

Dr.Pet FELFÚJHATÓ JOGVÉDETT GALLÉR

(antiallergén)

Kutyára és macskára javasolt!

A Dr.Pet felfújható gallér egy erős külső rétegből és egy felfújható gumibelsőből áll. A külső réteg anyaga nagyon erős, harapás és karmolás álló! Extra széles kivitelben, 6 méretben készül. A gallér többször is felhasználható, időtálló, a belső esetleges meghibásodása esetén csak külön a belső is megvásárolható nálunk!

Előnye hogy pille könnyű, egész kicsire összehajtható és elrakható.



A gallért a gumibelső felfújó szelepének összenyomásával lehet felfújni, akár egy úszógumit. A felfújott gallér, mint egy párna öleli körül a nyakat, mely korlátozottá teszi az állat nyakának mozgását. A gallért tépőzár segítségével lehet összezárni az állat nyakán. Az erős külső és a nagy ellenállású belső nem lukad ki, nem szakad ki a használat során.


Ha véletlenül előfordul gyári hibás belső (szelep melletti vagy forrasztások mentén található hibák) és ezt jelzi felénk, valamint részünkre visszaküldi a hibás belső részt, úgy garanciában kicseréljük!

A gallér belsejében található szövet fülek az a célt szolgálják, hogy a kutya nyakörvét vagy egy gézcsíkot bele lehessen húzni, ezzel még biztonságosabbá téve a gallér használatát, mivel így nem tudja leszedni a gallért magáról.

A gallér anyaga, ha koszos lesz vizes ruhával tisztára törölhető, vagy kézzel mosható.

Nagyon fontos a pontos illeszkedés. A gallér teljesen felfújott állapotban vegye körül a nyakat, illetve pici hézag lehet. Ha két méret között gondolkodik, akkor mindig a nagyobbat kell választani, még ha az nagynak is fog kicsit tűnni a kutyán/cicán. Leesni nem tud róla, hiszen nyakörvvel rögzítve van, viszont nagyobb lesz a hatékonysága.

A hatékonysága a szürkével jelölt területen 100%-os, a fekete területeken ez a hatékonyság függ a kutya fajtájától, felépítésétől, habitusától.

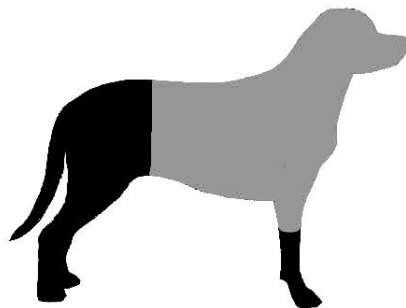

FONTOS!

Csak fokozott figyelem mellett ajánlott olyan fajták esetében, akik hosszú végtagokkal vagy hosszú nyakkal rendelkeznek, mint pl. az agárfélék vagy a dobermann, illetve az olyan hiperaktív kutyáknál, akik fáradságot nem kímélve oldják meg, hogy elérjék magukat bármi áron!

Amennyiben a kutya sérült területe a szürke tartományon kívül esik, illetve azoknak, akik a fokozott figyelem kategóriába tartoznak, válasszák a Dr.Pet BIG BOY gallérunkat!

Dr.Pet **BIG BOY**
SPECIÁLIS POLIÉSZTER TÖLTETŰ JOGVÉDETT GALLÉR

(antiallergén)

Kutyákra javasolt!

A Dr.Pet BIG BOY egy erős külső rétegből áll mely egyfajta könnyű és puha speciális poliészter töltettel rendelkezik. A külső réteg anyaga nagyon erős, harapás és karmolás álló! Extra széles, és extra dundi kivitelben, igényesen megtervezett lekerekített formával 6 méretben készül.

A BIG BOY gallér többször is felhasználható, időtálló, és formatartó, ellentétben a polisztirol gyönggyel töltött gallérral szemben, mely jó esetben is talán egyszer használatos, hiszen töltete a babzsákhhoz hasonlatosan teljesen összeesik, ezáltal a gallér deformálódik, hatékonyságát akár 2-3 nap alatt elveszíti. Szakadás esetén akár életveszélyessé is válhat a szétguruló polisztirol gyöngy, hiszen a kutyának csábító falatnak tűnhet, s ha megeszi akár bélelzáródást is okozhat.




A gallér, mint egy párna öleli körül a nyakat, mely korlátozottá teszi az állat nyakának mozgását. A gallért tépőzár segítségével lehet összezárni az állat nyakán. A gallér anyaga, ha koszos lesz, vizes ruhával tisztára törölhető, vagy kézzel mosható.

A gallér belsejében található szövet fülek az a célt szolgálják, hogy a kutya nyakörvét vagy egy gézcsíkot bele lehessen húzni, ezzel biztonságossá téve a gallér használatát, mivel így nem tudja leszedni a gallért magáról.

Nagyon fontos a pontos illeszkedés. A gallér teljesen vegye körül a nyakat, illetve kicsi hézag lehet. Ezt a fajta gallért azoknak ajánljuk, akik a felfújható gallér hatékonyságán kívül esnek, illetve a nagyon izgó-mozgó, hosszú orrú, nyakú nyúlánk kutyáknak.

A kutya testén 95%-ban hatásos, melyet a szürke terület jelez.

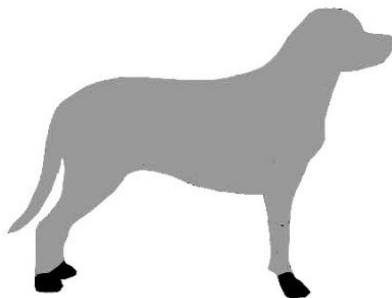

A Dr.Pet Big Boy gallért azoknak ajánljuk, akik a felfújható gallér hatékonyságán kívül esnek, illetve a nagyon izgó-mozgó, hosszú orrú, nyakú nyúlánk kutyáknak.

FONTOS!

Sajnos a Dr. Pet kényelmes gallérok NEM MINDEN ESETBEN válnak be az állatnál, de a legtöbb esetben jó alternatívának bizonyul.

A gallért a belső fülek segítségével mindenképpen rögzíteni kell nyakörvvel vagy gézcsíkkal a kutyus nyakán, ugyanúgy ahogy a hagyományos műanyag gallér esetében, különben könnyen le tudja szedni magáról!