

emmi-pet

PROFESSIONÁLIS FOGTISZTÍTÁS ÁLLATOKNAK 100% ULTRAHANGGAL

Használati útmutató

Köszönjük, hogy ultrahangos készülékünket választotta állatai fogainak tisztítására és szájhygiéniájuk biztosítására. Azért, hogy megismerkedjen az Emmi-pet készülék használatával, kérjük olvassa el gondosan és alaposan a kezelési kézikönyvet. Ez szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el készülékünk használatával.

Az Emmi-pet csomag tartalma:

Emmi-pet HT (kézi egység), Emmi-pet 100-240C hálózati töltő, Emmi-pet A1/A2 UH fogkefe fejek, Emmi-pet ZA UH fogkrém állatoknak (75 ml).

Az **emmi[®]-dent** termékek hivatalos magyarországi forgalmazója:

 **patikatars.hu**



Emmi Ultrasonic GmbH



Magyarországon forgalmazza a Patikátárs Kft.
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.
Tel: +36 20 498 11 66
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu

 **Kiadva:**

2021-09-03

emmi-pet

DIN EN ISO 9001:2008



60020118

Fontos – az elemek feltöltése/ töltésenkénti teljesítmény

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kézi egység a töltés alatt ki van kapcsolva, máskülönben nem kezdődik el a töltés. Mindig kapcsolja ki, ha felteszi a töltő állomásra és hagyja rajta a kefefejét, így könnyebb ellenőrizni az állapotát. Ha naponta 10 percet használja az eszközt, az elem töltöttsége kb. 10 napra elegendő. Ezután újabb 24 órás töltés szükséges.

Első használat

1. Az UH fogkefe fejet mindig függőleges irányban helyezze be és ugyancsak függőlegesen távolítsa el. Ez megakadályozza a kézi egység csatlakozó tűjének megrongálódását.
2. Csatlakoztassa a dugót az aljzatba, tegye a kézi egységet az UH-os fejjel a töltőre és töltse 24 órán át.

FONTOS BIZTONSÁGI TANÁCS

Az Emmi Ultrasonic GmbH ultrahangos készülékei a fogtisztítás és szájhigiéncia legújabb és leghatékonyabb módját nyújtják mind emberi, mind állati felhasználás céljára. Kérjük, olvassa el a felhasználási tájékoztatót és a figyelmeztetéseket alaposan. Az áramütés elkerülése érdekében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

1. Mindig úgy helyezze el a töltőt, hogy ne eshessen bele a kádba vagy a mosdóba.
2. A töltőt száraz felületre helyezve használja, száraz környezetben.
3. Ha a töltő vízbe esik, ne érjen hozzá.
4. Azonnal áramtalanítsa.
5. Sose használja a töltőt a fürdőkádban.

LED kijelző

1. A LED kék – TÖLT

Ha a kézi egység a töltőn van, a kék LED világít, ha a töltés befejeződött, a kék LED kialszik.

2. A LED zöld – BEKAPCSOLVA

Ha a készüléket bekapcsolja és az UH-os fejet csatlakoztatja, a zöld LED folyamatosan világít.

3. A LED villogó piros – ELLENŐRIZZE/HIBA

Ha az elem lemerült vagy hibás, a piros LED villog és a készülék kikapcsol.

4. Ha a készülék ki van kapcsolva nincs kijelzés.



Töltés közben mindig csatlakoztassa az UH kiegészítőt a készülékhez, a kézi egység állapotának jobb ellenőrzése érdekében.



Rendeltetészerű használat

Káreset, tűz, áramütés és sérülések elkerülése érdekében kövesse az alábbiakban leírtakat: A terméket csak arra a célra használja, ami a leírásban szerepel. Ez azt jelenti, hogy csak állatok fogtisztítására, szájhigiénia-ápolására és csak az Emmi Ultrasonic GmbH által ajánlott eszközökkel és kiegészítőkkel használja a készüléket. A termék nem megfelelő alkalmazása esetén, a gyártó cég elhárít minden felmerülő kárral és garanciával kapcsolatos felelősséget. A kézikönyvben foglalva találja a helyes használatra vonatkozó figyelmeztetéseket, amiket ezzel a szimbólummal jelölünk a készülék tájékoztató tábláján: ⚠

A termék jó és biztonságos működéséhez megfelelő szállítás, tárolás, elhelyezés, beállítás, kezelés és karbantartás szükséges. A BGV A3 szerinti ellenőrzéseket figyelembe kell venni. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos dugó bármikor szabadon hozzáférhető legyen.

Nem rendeltetészerű használat

Ha nem rendeltetészerű módon használják a készüléket, az életveszélyes lehet és anyagi kár is keletkezhet. Ezért az ilyen alkalmazás tilos! A termék nem megfelelő alkalmazása esetén, a gyártó cég elhárít minden felmerülő kárral és garanciával kapcsolatos felelősséget.

Hogy ezt elkerülje, kövesse az alábbi utasításokat:


- A fogtisztító és szájhigiénia-ápoló készüléket csak a termék tájékoztató címkéjén feltüntetett feszültségen lehet működtetni (a töltő alján található).
- Ne használjon gyúlékony vagy agresszív vegyszereket, savakat, lúgokat stb. a készülék tisztításához.
- Ha szállítási sérülést tapasztal, ne csatlakoztassa a töltőt áramforráshoz.
- A készüléket csak lakásban, szobahőmérsékleten lehet használni.



EGÉSZSÉGES FOGAK = EGÉSZSÉGES ÁLLAT

Szoktassa hozzá kedvencét az Emmi-pet ultrahangos fog- és szájpólishoz

1. Nyomjon 1 cm UH fogkrémet az ujjára. Hagyja, hogy az állat megszagolja és megnyalja a fogkrémet.
2. Kapcsolja be a készüléket és mutassa meg az állatnak.
3. Tartsa közel az Emmi-pet kézi egységet az UH fejjel az állat szájához és beszéljen hozzá olyan hangon, amitől az állat megnyugszik.
4. Óvatosan emelje fel/nyissa szét az állat ajkait és lassan tolja be az UH kiegészítőt a szájába, hogy hozzászokjon a higiénias folyamathoz.
5. Kezdje el megtisztítani a fogait. A sörtéssel ossza el lazán az UH fogkrémet az állat fogainak külső és belső részén és rágó felületén. Kezdje a hátsó fogakkal úgy, hogy UH fej keferését mozdulatlanul tartja, minden nyomás nélkül. Egyszerre 1-3 fogat tud lefedni. Körülbelül 10 másodpercig hagyja a kefét a fogakon és ezután helyezze át a következő részre. A tisztítás során ne mozgassa a készüléket, különben nem fog működni. Az emmi-pet UH az UH-os fogkrémekben generált mikro-buborékokkal alapos és dörzsölésmentes tisztítást biztosít.
6. Tisztítás után, mossa el a sörtéket folyóvíz alatt. A készülék maradjon bekapcsolva ezalatt. Öblítés után kikapcsolhatja a készüléket. Az ultrahangnak sterilizáló hatása van, ami fertőtlenítést biztosít az öblítés után. Minden tisztítás után, a készüléket vissza lehet helyezni a töltőre. Ez nem károsítja az elemet.

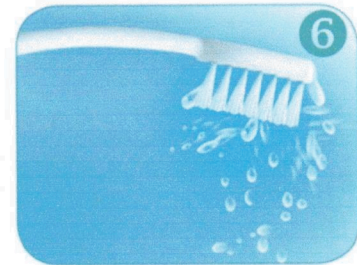

Napi használat

Az Emmi-pet fog és szájápoló készüléket heti 1-3 alkalommal javasoljuk használni. A fogtisztítás legyen 3-5 perc időtartamú. Gyulladások vagy komoly fogkő lerakódások esetén hosszabb tisztítási idő és rendszeres állatorvosi ellenőrzés javasolt.

Ultraszhang

Az Emmi-pet ultraszhangos állat fogkrémet kifejezetten állatok fogápolására fejlesztették ki. Az Emmi-pet, a fog- és szájápolásra való UH egységgel gyengéden tisztítja meg az állatok fogait, bármiféle dörzsölés nélkül. Fontos, hogy emmi-pet UH fogkrémet használja kedvence fogápolására. A hagyományos fogkrém nem generál mikro-aktivitást (mikro-buborékokat), ami elengedhetetlen az Emmi-pet UH működéséhez a fogápolás során.

Az UH több mint 3.5 millió mikrobuborékot generál az emmi-pet UH fogkrémbe.

A buborékok elenyésznek, aztán újra keletkeznek, újra elenyésznek stb. A buborék betódulások során hatalmas erők szabadulnak fel, amik eltávolítják a szennyeződéseket. Mindez pedig úgy történik, hogy az állat ebből semmit sem vesz észre.

FONTOS

A készülék vibrálás és zajmentesen működik, hogy ne ijessze meg az állatot. A készülék akkor működik megfelelően, ha a kézi egység kapcsolója alatti zöld kijelző folyamatosan világít a működés során. A készüléket nem lehet használni, ha az UH fej nincs feltéve.



Akut gyulladások és fogínyorvadás


Akut problémák esetén tartsa a sörtéket lazán az érintett fogakon és merőlegesen az ínyen. Tartsa rajtuk kb. 30-60 másodpercig. Ez gyors és tényleges javulást fog hozni. A hosszabb használat nem veszélyes, mert az ultrahang egyáltalán nem káros.

Rossz szájzag megelőzése

Mivel az Emmi-pet ultrahang csökkenti a baktériumok mennyiségét az ínyen és az ínben, ezért megelőzi az élő baktériumok okozta rossz szagot, körülbelül 12 órán át.

Hogyan működik az Emmi-pet Ultrahang

Az Ultrahanggal való fog és szájápolás hatékony otthoni módszer. Az Emmi-pet készülék a hagyományos, mechanikus dörzsölés módszerével tisztító kézi, elektromos vagy szónikus fogkeféktől eltérően működik. Az Emmi-pet a modern ultrahang technológia lehetőségeit alkalmazza. Az Emmi-pet készülékkel való fogápolás során, a tisztítás nem a hagyományos fogkefékkel szokásos síkáló művelettel történik, hanem kíméletes Ultrahanggal. Az ultrahang alkalmazása teljesen ártalmatlan emberre és állatra egyaránt, életkortól függetlenül. A kutatások kimutatták, hogy max. 50 W-ig az ultrahang veszélytelen emberre és állatra. Az Emmi-pet készülék pedig mindössze 0.2 W-t használ.

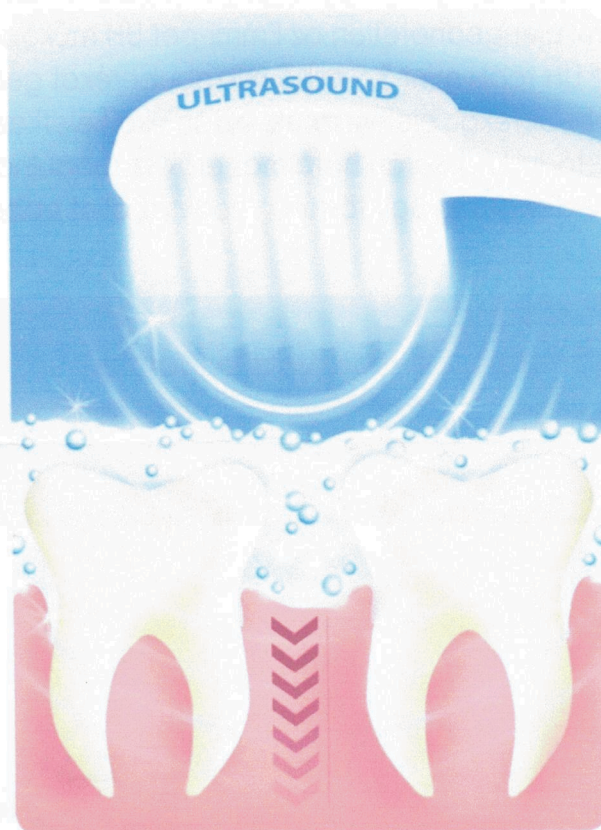

A pozitív hatást és a biztonságot fogorvosok és implantológusok bebizonyították és megerősítették. Ultrahangos fog- és szájápolást évek óta alkalmaznak, mellékhatások nélkül. A kefefejben lévő szabadalommal védett UH chip percenként sokmillió UH hullámot generál. Az UH hullámok a sörtéken keresztül az UH fogkrémbe jutnak, ahol mikrobuborékok milliói jönnek létre. Mikroszkopikusan parányi méretük lehetővé teszi, hogy a mikrobuborékok bejussanak a legkisebb résekbe, fogközökbe, repedésekbe az íny és fogak között. A szennyeződések, ételmaradékokat és fogkövet tartósan eltávolítják és hatásukra a baktériumok mennyisége csökken. Az Emmi-pet egy UH készülék állatok fog és szájhygiénás ápolására. A készüléket 2009 óta világszerte többszázezer elégedett vásárló által megvásárolt Emmi-dent Professional alapján fejlesztettek ki.

Emmi-pet ZA Ultrahangos Fogkrém Állatoknak

Emmi-pet ZA – Ultrahangos fogkrém kifejezetten állatok szükségleteire fejlesztve

Emmi-pet A1/A2 Ultrahangos kiegészítők

- Nagy kiegészítő nagy kutyák és lovak számára
- Kis kiegészítő kiskutyák és macskák számára

Higiéniai okokból ugyanazt a kiegészítőt nem szabad használni több állatnál. Cserélje ki a kiegészítőt 3 havonta, mert az UH ennyi idő után ellágyítja a sörtéket. Ha a sörték puhábbak, az UH átjutása csökken és a fogtisztítás kevésbé lesz hatékony. A kiegészítő alkotórészek a www.jopatikus.hu webáruházban megvásárolhatók.



Elem kezelése és a vele kapcsolatos hulladékkezelési eljárás

A készülék vízálló kézi egységében található az elem. Használat után a kézi egységet vissza kell helyezni a töltőre. Amikor teljesen feltöltődött, kb. 10 napig lehet használni újratöltés nélkül. Ha naponta 10 percnél hosszabb ideig tart a fogtisztítás, az elemeket gyakrabban kell tölteni. Ne hagyja, hogy az elemek teljesen lemerüljenek. Ha bekapcsolás után a zöld kijelző nem világít, hanem elkezd villogni, ez azt jelenti, hogy az elemek elérték a kritikus töltöttségi szintet. Ebben az esetben rögtön töltsse fel a készüléket, hogy elkerülje az elem károsodását. Bár a készülék speciális, környezetbarát lítium elemet tartalmaz, ne dobja a háztartási hulladék közé. Vannak közösségi gyűjtőhelyek, ahová elhelyezhetők (pl. hasonló elemek árusító helyei).

EMAG AG
DIN EN ISO 9001:2008



RoHS CE
(§6Abs.3, ElektroG)

Garancia

Emmi-pet ultrahangos készülékünkre a vásárlástól számított 2 év gyártói garanciát vállalunk. A garanciális idő alatt bekövetkező anyag/gyártási hibák orvoslásra kerülnek javítás vagy csere formájában költségmentesen. Törvényi előírásoknak megfelelően, minden más kompenzációs igény ki van zárva a garanciából. A garancia nem érvényes olyan esetben, amikor harmadik fél belenyúl a készülékbe, szétszereli az Emmi Ultrasonic GmbH előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A garancia akkor sem érvényes, ha önkényes károkozás vagy helytelen használat eredménye a meghibásodás. Jótállási idő módosítása esetén a garanciális idő nem hosszabbodik. Emmi Ultrasonic GmbH fenntartja a jogot arra, hogy kiszámlázza azokat a költségeket, amelyek indokolatlan reklamációk – rossz beüzemelés vagy működtetési hiba - miatt keletkeznek. A garancia érvényesítéséhez meg kell őrizni a vásárlás bizonylatát, ami tartalmazza a vásárlás dátumát. A garanciális igény gyors intézése érdekében küldje el a készüléket, a számlamásolatot és egy rövid hibaleírást. Utánvétes csomagot nem fogadunk. Köszönjük együttműködését és megértését!

A leírásban található képek illusztrációk, a gyártó fenntartja a jogot az esetleges műszaki változtatásokra, módosításokra!

EMAG AG
DIN EN ISO 9001:2008



RoHS CE
(S6Abs.3, ElektroG)



4 040513 501171

63940316