

Használati javaslat a
JH380V
pulzoximéterhez

Kis állatok monitorozásához a csipeszes érzékelőt két testrész egyikén ajánlott elhelyezni az alábbiak szerint:

1. A csipeszes érzékelőt az állat nyelvére helyezzük.

Amennyiben az állat nyelve túl vékony előfordulhat, hogy a csipesz nyomásának hatására veszít vértelítettségéből, így az érzékelő nem tud jelet adni.

Ezt megelőzendő ajánlott a nyelvet gézzel betekerni és az érzékelőt a betekert nyelvre felhejteni. A géz csökkenti a nyomást a nyelven, így annak vér telítettsége nem csökken le.

Az alábbi képen két csipeszes érzékelő látható, de a módszer ugyanúgy működik egy érzékelővel is.



Sok esetben az is jó eredményt ad ha csipeszes érzékelőt az állat ajkára helyezünk, ügyelve arra, hogy ne legyen vastag szőr és erősen pigmentált bőr a mérendő felületen.



2. Csipeszes érzékelőt az állat fülére helyezük.

Hajtsuk le az állat fülét és a csipeszes érzékelőt a **lehajtott, dupla vastagságú** felületre helyezük el. Ezzel is megakadályozhatjuk a vékony fül esetleges vértelítettségének csökkenését.



Vastagabb fülű állatoknál elegendő lehet visszahajtás nélkül, simán a fül vastagabb részén elhelyezni az érzékelőt.



3. A csipeszes érzékelőt egyéb, szőrrel kevésbé borított felületen helyezük el.

Elhelyezhető a csipeszes érzékelő, más vékony szőrrel borított felületen is, pl. hasi – lágyéki tájékon. Ügyeljünk rá, hogy az adott területen ne legyen erősen pigmentált bőr és az adott területnek kellő artériás vérellátása legyen.

